

# CENTRIX Access Crown®

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Access® Crown

Materiał kompozytowy, Bys-Akryl do koron i mostów tymczasowych.

360030 Odcień A3 B1 360031 Odcień 360032 Odcień B3

360034 Odcień A1 A2 360035 360037 Odcień C2 360038

Access® Automix Crown (76g) lub AccesCrown syringe (5 ml) jest materiałem do sprawnego i szybkiego wytwarzania tymczasowych koron i mostów. Jest kompatybilny z lekkimi kompozytami, wysoka trwałość koloru, odporny na promieniowanie Rentgena.

### ZASTOSOWANIE

1. Zrób przedzabiegowy wycisk używając masy wyciskowej Access® Blue Vinyl Polysiloxane lub innej masy alginatowej. Odcisk powinien być zrobiony dokładnie. Można zrobić dodatkowy wycisk, jeśli jest taka konieczność.

2. Przy tworzeniu tymczasowego mostu, Pontyjskiego obszar może zostać usunięty z odcisku w celu stworzenia tymczasowego mostu. Opracowany ząb jest przygotowany pod wycisk i tymczasową pracę.

UWAGA: Zawsze wypuść trochę materiału zanim rozpoczniesz pracę.

3. Osusz wycisk i wypełnij materiałem Access® Crown w wymaganych miejscach przygotowania. Wypełnij od dołu do góry. Gdy matryca jest wypełniona w 3/4 całości (w ciągu 30 sekund) umieść ją w ustach pacjenta.

4. Zostaw Access® Crown w nienaruszonym stanie przez 60 sekund (90 sekund od rozpoczęcia pracy), a następnie usuń z jamy ustnej. Materiał będzie miał konsystencję gumy i przez chwilę może się ciągnąć. Materiał ulega całkowitemu wiązaniu w dodatkowym czasie ok. 3 ½ minuty, innym sposobem przyspieszającym wiązanie jest zanurzenie Access® Crown (tymczasowej pracy) w gorącej kąpieli wodnej przez 30 sekund.

5. Usuń matrycę z opracowanego zęba, jeśli pozostanie trochę materiału, oszlifuj za pomocą wiertła. Usunąć warstwę mazistą alkoholem.

6. Jeżeli wszystko zostało zastosowane wg wskazówek to nie powinno być potrzeby przycinania. Jeśli przycinanie jest konieczne, użyj wiertła o drobnym, diamentowym ziarenku.

7. Jeśli polerowanie jest potrzebne, należy użyć systemów od polerowania.

8. Spróbuj umieścić tymczasową pracę w jamie ustnej pacjenta.

9. Zacementuj pracę każdym cementem tymczasowej z serii Access® cementy lub innymi cementami nie zawierającymi eugenolu lub zawierającymi eugenol.

Naprawa ubytków w pracach tymczasowych:

1. Opłucz i osusz pracę tymczasową Access® Crown.

2. Oszlifuj delikatnie diamentowym wiertłem.

3. Wysusz, aby usunąć proszek z powierzchni, a następnie wytrzyj do czysta alkoholem.

4. Użyj systemu wiążącego i leczenia światłem przez 10 sekund.
6. Dopasuj odcień VersaFlo® do usterki i polimeryzuj światłem przez 10 sekund.
7. Jeśli dodatkowe korekty nie są potrzebne, usuń z jamy ustnej i polimeryzuj przez kolejne 30 sekund.

