

## Champ

Champ służy do lakowania bruzd i zagłębień w profilaktyce próchnicy.

Wskazówki w użyciu:

1. Wyczyść powierzchnię szkliwa za pomocą pasty polerskiej ( bez substancji oleistych). Usuń cały osad.
2. Dobrze spłucz, usuwając bardzo dokładnie resztki pasty z zagłębień i bruzd.
3. Przygotuj szkliwo do lakowania.
4. Odizoluj opracowywany obszar i osusz go za pomocą bezolejowego sprężonego powietrza.
5. Wytrwa szkliwo za pomocą kwasu fosforowego. Traw przez 15 sek, następnie spłucz.
6. Delikatnie wysusz za pomocą bawełnianych waczków lub sprężonego powietrza. Usuń dokładnie resztki wody. Pozostaw ząb odrobinę wilgotny. Champ wiąże w niedużej obecności śliny, nie mniej jednak najlepiej jest zablokować dostęp śliny do lakowanego obszaru.
7. Uważnie oderwij folię do tyłu, tak aby mieć łatwy dostęp do pojemniczka z lakiem i brusha.
8. Weź aplikator do ręki.
9. Nałóż cienką warstwę Champa na powierzchni szkliwa. Nakładaj materiał z guzka na guzek, ale nie zakrywaj lakiem brzegów.
10. Polimeryzuj przez 20 sek lampą o natężeniu 300mW/cm<sup>2</sup>. Można używać wszystkich rodzajów lamp. Jeśli lampa ma większe natężenie, lak zwiąże szybciej.
11. Sprawdź okluzję, dopasuj jeśli istnieje taka potrzeba.
12. Gdy zakończysz zabieg, wyrzuć opakowanie.

Przeciwwskazania

Champ nie stosuj u pacjentów uczulonych na którykolwiek ze składników. Nie stosuj na powierzchnię zęba pokrytą próchnicą.

The logo for Centrix, featuring the word "centrix" in a bold, white, sans-serif font inside a dark blue rounded rectangular border.