

Connexio



Dualny, samowytrawiający bond VII generacji Connexio™ z nanowypełniaczem . Szybko i łatwo tworzy silny związek z twardymi tkankami zęba. Connexio™ to system dwubutelkowy, gdzie jedna komponenta to żywica światło- ,a druga chemo-utwardzalna. Wymaga wymieszania obu składników. Connexio™ toleruje średni poziom wilgotności. Może być używany ze wszystkimi kompozytami światło-, chemo-utwardzalnymi, kompozytami dualnymi do odbudowy zrębu, cementami kompozytowymi.

Zalety:

- Wysoka adhezja do zębiny, porównywalna do systemów piątej generacji(39,3 MPa).
- Nie wywołuje nadwrażliwości.
- Pewność całkowitej polimeryzacji w miejscach, do których nie dociera światło.
- Idealny podczas cementowania wkładów w kanale z użyciem Encore® D/C MiniMix® (odbudowa zrębu) lub dualnym cementem kompozytowym.
- Nie wymaga wytrawiania. Nie ma kłopotu z usuwaniem kwasu z kanału.
- Idealny do stosowania u dzieci i młodzieży z szeroko otwartymi kanalikami lub w bliskim sąsiedztwie komory.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Pole zabiegowe powinno być w miarę możliwości osuszone. Unikaj zanieczyszczenia krwią lub śliną.
2. Opracowany ubytek przedmuchaj delikatnie strzykawko-dmuchawką. Nie przesuszaj zębiny, powinna ona pozostać wilgotna.
3. Connexio jest system podwójnie wiążącym , dlatego powinno być użyte zaraz po zmieszaniu. Wymieszaj 1 kroplę z buteleczki Part 1 oraz 1 kroplę z buteleczki Part 2.
4. Nałóż warstwę systemu bardzo cienką warstwą na szkliwo/zębinę i wcieraj patyczkiem przez ok. 20 sek. (z racji, że jest to Bond dualny unikać bardzo mocnego naświetlenia)
5. Osusz aplikowany Bond powietrzem ok. 5 sek.
6. **POLIMERYZACJA:**
 - bezpośrednia odbudowa. W przypadku użycia światło, chemo oraz dualnych materiałów, warstwa bondu powinna być naświetlana przez ok. 10 sek.
 - pośrednia odbudowa. W przypadku użycia światło, chemo oraz dualnych cementów, Warstwa bondu powinna być naświetlana przez ok. 10 sek.

Osadzanie wkładów korzeniowych:

- wprowadź do kanału zmieszany materiał Connexio (part 1 oraz Part2) i wcieraj aplikatorem przez ok. 20 sek., a następnie osuszaj przez ok. 5 sek. Nie naświetlaj warstwy bondu w kanale.
- następnie mając przygotowany wkład korzeniowy (tytan , metal , włókno szklane) i opracowany kanał, wprowadź wkład z odpowiednim cement do kanału. Kolejnym krokiem jest polimeryzacja przez ok. 40 sek w celu poprawnego przymocowanie wkładu i materiału do kanału korzeniowego.

PRZECHOWYWANIE

Po każdym użyciu materiału, szczelnie zamykaj buteleczki . Connexio powinno być przechowywane w temp. 4 °C – 23 °C.

PRZECIWWSKAZANIA:

Connexio zawiera: kwasy organiczne, BIS-GMA, HEMA, TMPTMA, campherchion, aminy, BHT, katalizator, fluor oraz etanol. Nie używaj materiału Connexio jeżeli pacjent jest uczulony na któryś z powyższych składników.

W razie przypadku kontaktu materiału z oczami, natychmiast przepłukuj oczy sporą ilością wody.

