

D/Sense Crystal

Żel o podwójnym działaniu z kryształkami do znoszenia nadwrażliwości.

Instrukcja użycia.

D/ Sense Crystal to jednoetapowy żel do znoszenia nadwrażliwości o podwójnym działaniu, zarówno działa na zębinę jak i zamyka kanaliki zębowe. Reaguje z zębiną w celu utworzenia mikrokryształów szczawianu wapnia i azotanu potasu. Kryształy te penetrują głęboko do kanalików zębowych i uszczelniają go na stałe kwasoodporną substancją (zazwyczaj nie mniej niż 3 mikrony grubości).

D/Sense Crystal może być także używany pod korony, mosty lub pod inne prace protetyczne, które wymagają wcześniejszego zniesienia wrażliwości. Opatentowany roztwór wody, binoksalate potasu i kwasu azotowego.

Ostrzeżenie

Unikać kontaktu z oczami. Jeśli materiał dostanie się do oczu natychmiast przemyć dużą ilością wody i skorzystać z pomocy medycznej. Zawsze wyciśnij odrobinę materiału na szkiełko lub inną powierzchnię roboczą. Prawo zabrania sprzedaży tego materiału innym osobom nie będącymi dentykami.

Przechowywanie

Przechowuj w temperaturze pokojowej. Nie dawaj do lodówki. Niska temperatura można wytrącić sól z roztworu. Pacjent znieczulony powinien mieć aplikowany materiał o temperaturze ciała.

Wskazówki dotyczące użycia.

1. Zdejmij nasadkę ze strzykawki i delikatnie włóż piankową końcówkę SoftNeedle™.
2. Aby poprawić komfort pacjenta, materiał powinien mieć temperaturę ciała, (temperaturę można uzyskać trzymając pod bieżącą ciepłą wodą przez 10 sekund).
3. WAŻNE! Dla dokładnej kontroli, trzymaj strzykawkę w dłoni. Ściśnij tłok z podstawy kciuka. NIE naciskaj tłoku z czubka kciuka.
4. Sprawdź wypływ materiału ze strzykawki. Przetestuj na podkładce przed użyciem wewnątrz jamy ustnej. Naciśnij strzykawkę bardzo powolnym, ale stałym naciskiem.
5. Delikatnie wcieraj w powierzchnię zębiny przez 20 sekund. Upewnij się, że pokryłeś dobrze cały obszar. D / Sense Crystal może być stosowany do zębiny wilgotnej lub suchej.
6. Susz delikatnie przez 30 sekund strumieniem powietrza. Jeśli nie używasz do osuszenia sprężonego powietrza, pozostaw do wyschnięcia przez 2 minuty. Zobaczysz mroźny, biały osad.
7. Powyższa procedura może być powtarzana w razie potrzeby. Usuń SofNeedle po użyciu.

Zastosowania kliniczne:

- aplikuj na zęby wrażliwe po zabiegu wybielania,

- zastosuj przed cementowaniem stałej lub tymczasowej korony lub mostu. D/Sense Crystal jest kompatybilne prawie ze wszystkimi stałymi lub tymczasowymi cementami, materiałami zawierającymi tlenek cynku, polikarboksylany oraz galsojonomerami.
- zastosuj na odkryte kanały. D/Sense ma mały stopień drażliwości, dlatego można go zastosować blisko kieszonki dziąsłowej.
- zastosuj pod odbudowy kompozytowe lub z amalgamatu,
- zastosuj na wrażliwe powierzchnie przed lub po scalling lub leczeniu kanałowym,
- Eugenol nie ma wpływu na działanie D/Sense. Po cementowaniu nałóż materiał blisko brzegu, tak aby uszczelnić odsłoniętą zębinę.

