

Instrukcja Użytkowania

COUTURE DIAMOND POLISHING PASTE

REF: 390007 – Diamond Polishing Paste

Zawartość:

2,5 g strzykawka + 1 nylonowa szczoteczka

OPIS PRODUKTU:

- Jednoetapowa pasta extra-fine zawierająca drobinki diamentowe o wielkości 15 mikronów.
- Idealna do pracy nawet na rozległych powierzchniach , zapobiega wypadaniu oraz rozszczelnieniu wypełnień kompozytowych.
- Pasta o unikalnej konsystencji, nie rozpryskuje się podczas pracy. Zalecana do pracy z narzędziami wolnoobrotowymi max . 6000 obrotów.
- Couture Diamond Paste tworzy najwyższej klasy efekt polerujący .

WSKAZANIA UŻYCIA:

- **Do finalnego polerowania prac oraz do polerowania na wysoki połysk na wszystkich obszarach (szkliwo, kompozyt, porcelana, ceramika, metal).**
- **Redukuje przebarwienia na szkliwie.**

UŻYTKOWANIE:

- Może być aplikowane za pomocą szczoteczki nylonowej lub innej odpowiedniej szczoteczki.
- Używaj bardzo niskiego/delikatnego ciśnienia podczas pracy z Pastą Diamentową COUTURE.
- Zawsze używaj wolnoobrotowych narzędzi .
- Do najlepszego efektu – wysokiego połysku wystarczy 15 sek.

UWAGI:

- Nie używaj pasty po terminie ważności .
- Kolory past mogą się nieznacznie różnić. Nie ma to żadnego wpływu na wysokość połysku.
- Aby zachować jednorodność pasty, przechowuj ją w lodówce w temp. 2-7stopni Celsjusza.
- W celu uniknięcia wypływu pasty z tubki, zaraz po aplikacji zamykaj tubkę.
- Zaleca się użycia okularów ochronnych lub przyłbic zarówno dla pacjenta jak i lekarza.
- Jeśli pasta była bardzo długo nieużywana , może być delikatnie sucha, w celu przywrócenia wilgotności należy dodać odrobinę wody.

The logo for Centrix, featuring the word "centrix" in a bold, white, sans-serif font inside a dark blue rounded rectangular border.