

ENCENTRIX **Encore**® D/C MiniMix®

Instrukcja użycia

1. Rekomendowane zastosowanie koferdamu lub wałków z ligniny do izolacji pola zabiegowego.
2. Usuń istniejące wypełnienia i próchnicę.
3. Pokryj preparację 32%-40% kwasem fosforowym (20 sekund). Zaleca się użycie 40% wytrawiacza Centrix Onyx™.
4. Wyplucz dokładnie (30 sekund) i delikatnie osusz. Wytrawione szkliwo powinno mieć matowy wygląd.
5. Użyj wyłącznie dualnego systemu wiążącego VII generacji. Nie stosuj systemów jednobutelkowych. Zalecane użycie bondu Connexio™. Po zastosowaniu systemu wiążącego szkliwo powinno mieć połysk. Przed polimeryzacją wydmuchaj nadmiary systemu wiążącego powietrzem dmuchawki do bardzo cienkiej warstwy.
6. W celu odbudowania zrębu postępuj wg wskazówek:
Umieść Encore D/C MiniMix we wnętrzu pistoletu Centrix®. Nałóż końcówkę mieszającą. Nie deponuj niewielkiej ilości pierwszej porcji materiału do ubytku, nie uległa właściwemu wymieszaniu, należy ją usunąć.
Następnie wprowadź końcówkę na dno preparacji i delikatnie wysuwając wypełnij od dołu do góry. Unikaj odrywania końcówki, aby nie stworzyć pęcherzy powietrza.
Jeżeli potrzebujesz, zastosuj piny lub posty jako wzmocnienie kanału lub korony. Możesz użyć gotowych matryc lub kształtek podczas odbudowy zrębu.
7. Pracuj standardowymi narzędziami do kompozytów.
8. Czas pracy materiałem Encore to 90 sekund . Warstwę do 4mm polimeryzuj przez 40 sekund , warstwę <2mm przez 20 sekund. Opracowanie mechaniczne i dopasowanie okluzyjne wykonaj po 5 minutach od rozpoczęcia pracy (ostateczna polimeryzacja chemiczna głębokich warstw).

Ostrzeżenia:

Nie stosuj łącznie z materiałami zawierającymi eugenol.

Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W razie zanieczyszczenia przemyj dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.

Unikaj kontaktu materiału z tkanką dziąseł.

Zapewnij suchość pola operacyjnego.

W głębokich ubytkach żywych zębów użyj właściwego podkładu.

Nie stosuj Encore bezpośrednio na dno głębokich ubytków w żywych zębach lub na obnażoną miążgę.

Nie używaj u pacjentów ze stwierdzoną alergią na składowe produktu.

Nie używaj po upływie terminu ważności.

The logo for Centrix, featuring the word "centrix" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark blue rounded rectangular background.