

## Centrix Dental - NoCord™ VPS

**NoCord™VPS** to unikalny i niezwykle prosty system mas wyciskowych do wiernego odtwarzania szczegółów.

NoCord™ VPS to rewolucyjny jednoetapowy, samoretrakcyjny system mas wyciskowych zaprojektowanych w technice wash and try.

Rewolucyjna nowość:

- **NoCord™ Wash** - pierwszy materiał o właściwościach hemostatycznych, który hamuje krwawienie i wypływ płynu z rowka dziąsłowego. Zawartość 15% ałunu (siarczan glinu, amonu) kontroluje krwawienie przez skuteczne zamykanie kapilar.

- unikalny **NoCord™ MegaBody™Tray Material** jako warstwa o wyjątkowej gęstości efektywnie wprowadza materiał pierwszej warstwy do rowka dziąsłowego, skutecznie odpycha dziąsło i pozwala pierwszej warstwie NoCord™ Wash idealnie odwzorować szczegóły preparacji. Nie używasz nici, więc nie traumatyzujesz dziąsła. Pacjent ma większy komfort, ty oszczędzasz czas.

Ten ekonomiczny system oszczędzi nie tylko twój czas:

-jeden system wiele korzyści: retrakcja, kontrola krwawienia i idealne odwzorowanie podłoża protetycznego.

-brak kosztów zakupu nici i past retrakcyjnych.

Zalety techniki Wash and Try:

-nie uczysz się nowych procedur użytkowania

-procedura jednoetapowa w tradycyjnym dwuwarstwowym systemie

Doskonałe rezultaty:

-precyzyjne odwzorowanie szczegółów preparacji

-wyjątkowo stabilny wycisk (nie ulega odkształceniom)

-NoCord™VPS nie tylko spełnia , ale przewyższa normy ISO i ma wszystkie cechy wiodących mas VPS 1

-doskonały system do szczegółowych wycisków pod prace mikroprotetyczne z niewielką preparacją lub bez preparacji

## Jednoetapowa technika Wash and Tray:

1. Wykonaj preparację. Osusz powietrzem dmuchawki.
2. Wprowadź NoCord™ Wash Material do kieszonki dziąsłowej , a następnie wokół preparacji.
3. Wypełnij łyżkę wyciskową NoCord™ MegaBody™ Tray Material.
4. Umieść łyżkę wyciskową w jamie ustnej pacjenta
5. Poproś pacjenta , aby zagryzł i nie otwierał ust do momentu polimeryzacji masy wyciskowej. Usuń wycisk po 3:45 min. Całkowite wiązanie nastąpi po 4:45 min.  
NoCord VPS delikatnie odsuwa dziąsło wokół opracowanego zęba tworząc przestrzeń dla NOCord Wash , który precyzyjnie skopiuje szczegóły preparacji.  
NoCord Wash zawiera 15% ałunu w celu kontroli krwawienia , skutecznego zamykania kapilar i hamowania wycieku płynu dziąsłowego.
6. Skontroluj wycisk. Wykonaj tymczasowe zabezpieczenie preparacji.

