

CENTRIX  
**NoMIX**<sup>®</sup>  
Temporary Cement

NoMIX<sup>®</sup> Cement tymczasowy dla pacjenta/strzykawka wersja do gabinetu.  
Cement aktywowany wilgocią do tymczasowych mostów i koron  
Przeznaczonego do używania przez czas krótszy niż 30 kolejnych dni.  
Przechowywać w temperaturze pokojowej (5 ° C - 25 ° C; 41 ° C - 77 ° F)  
REF 290040, 310157, 310520

NoMIX<sup>®</sup> Cement tymczasowy  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1) Wyczyść opracowanie/kikut po poprzednim cemencie .
- 2) Tę samą czynność powtórz z tymczasową koroną/mostem.
- 3) Odkręć zakrętkę i przebij wieczko z tubki.
- 4) Wyciśnij z tubki niewielką ilość cementu do środka korony/mostu.
- 5) Zwilż kikut.
- 6) Umieść pracę protetyczną na kikucie i poproś pacjenta , aby zagryzł zęby.

Nie wolno jeść przez godzinę.

**centrix**