

## Tempit® L/C

Światłoutwardzalny materiał do tymczasowego zabezpieczenia ubytków po wykonaniu preparacji typu inlay, onlay, overlay. Do tymczasowego zamykania ubytków w trakcie leczenia kanałowego i wybielania zębów martwych. Do ochrony tkanek miękkich po założeniu zamków ortodontycznych. Do uszczelniania brzegów formówek, kształtek i pasków celulooidowych w okolicy brodawki dziąsłowej podczas wypełniania ubytków .

- Nie wytrawiaj
- Nie używaj systemu adhezyjnego
- Wypełnij ubytek materiałem. Możesz pracować jedną warstwą
- Polimeryzuj 40 sekund tradycyjną lampą. Skróć polimeryzację wg wskazań producenta przy zastosowaniu lamp o dużej mocy
- Nadmiary w zgryzie usuń narzędziami rotacyjnymi lub skalpelem
- Jeśli chcesz usunąć całkowicie materiał z ubytku użyj zgłębnika.  
Nieinwazyjne usuwanie materiału gwarantuje zachowanie ubytku w niezmienionym kształcie
- Łatwa aplikacja . Łatwe usuwanie

Tempit®L/C występuje w naturalnym półprzezroczystym kolorze.

Dostępny w jednorazowych kardridżach do pistoletu (prosta aplikacja, eliminacja zakażeń krzyżowych).

