

Tempit Ultra F

Ostrzeżenie: Nie łącz z materiałami , które zawierają eugenol.

1.Oczyść i zdezynfekuj wypreparowany ubytek. Obnażoną miazgę zabezpiecz preparatem wodorotlenkowo-wapniowym (Calciject™). W zębach z żywą miazgą zaleca się pokrycie dna ubytków linerem znoszącym nadwrażliwość (Glu/Sense™).

2.Nie wytrawiaj. Nie stosuj systemu wiążącego.

3.Osusz bardzo dokładnie ubytek.

4.Umieść kapsułkę Tempit®Ultra F w pistolecie. Zdejmij zatyczkę i wyciśnij materiał do ubytku. Użyj formówki lub kształtki jeśli to konieczne. Pracuj konwencjonalnymi narzędziami do kompozytu. W celu ułatwienia pracy narzędziami metalowymi użyj gąbeczek LubeCube®. Zanurzenie narzędzia we wnętrzu gąbeczki eliminuje przyleganie materiału do nakładacza i gwarantuje lepszą kondensację Tempit®Ultra F w ubytku. Wariantem alternatywnym jest praca schłodzonym materiałem Tempit®Ultra F.

5. Możesz pracować warstwą do 6 mm. Polimeryzuj około 40 sekund przy użyciu tradycyjnej lampy polimeryzacyjnej.

6. Wypełnienie dopasuj w zgryzie i wypoleruj.

Przechowuj z dala od źródeł silnego światła.

Tempit®Ultra F Nie wymaga przechowywania w lodówce.

The logo for Centrix, featuring the word "centrix" in a bold, white, sans-serif font inside a dark blue rounded rectangular border.