

## VERSAFLO®

### Instrukcja użytkowania:

1. Opracuj zęba, następnie nałóż system wiążący.
2. Nałóż nową końcówkę na strzykawkę, wyciśnij równomiernie materiał. Przed aplikacją do zęba, zaleca się wyciśnięcie materiału na szkieleto.
3. Aplikuj materiał w warstwach nie grubszych niż 2 mm. Naświetlaj każdą warstwę min. 30sek.
4. Po każdym użyciu wyrzuć końcówkę strzykawki.

## ONYX

### Instrukcja użytkowania:

1. Nałóż odpowiednią końcówkę na strzykawkę.
2. Wytrawiacz zaaplikuj na szkieleto, a następnie za pomocą aplikatora umieść na opracowywanym miejscu.
3. Wytrawiacz powinien pozostać na zębie przez ok. 15sek. Spłucz wodą oraz osusz.
4. Opracowywana powierzchnia powinna być matowa, jeśli nie jest powtórz powyższe czynności.
5. Usuń igiełkę.

UWAGA: Onyx zawiera 40% kwasu fosforowego. Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub z błoną śluzową. W przypadku kontaktu z materiałem, optukać dużą ilością wody lub udać się do lekarza.

